



medemagruppen

### Armlehnenhöhen- und -breitenverstellung

Öffnen Sie den Reißverschluss an der Seite der Rückenlehne und die Rückenlehne selbst. Lösen Sie die Imbusschraube. Verstellen Sie die Armlehne nach oben/unten. Gleichzeitig kann die Armlehnenbreite beidseitig um bis zu 25 mm verstellt werden.

### Armlehnenwinkel

Durch die Justierungsschraube ist eine Verstellung der Armlehne um 60° möglich. Um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, kann die Armlehne nach oben gekippt werden.

### Lenkerhöhe

Verstellen Sie den Lenker nach oben/unten. Entfernen Sie die Gummikappe. Lösen Sie die Imbusschraube. Verstellen Sie den Lenker nach oben/unten und ziehen Sie die Imbusschraube wieder fest.

### Lenksäulenwinkel

Die Lenksäule kann mit dem Griff nach vorne/hinten verstellt werden. Drücken Sie den Hebel nach unten und verstellen Sie die Lenksäule näher zu sich oder weiter von sich weg für eine bessere Fahrposition.

### Sitz nach vorne/hinten

Ziehen Sie den Hebel nach oben, um ihn freizugeben. Stellen Sie den Sitz in Längs-/Rückenrichtung ein. Wenn der Hebel losgelassen wird, bleibt der Sitz am nächsten Anschlag stehen.

### Sitzdrehung

Ziehen Sie den Entriegelungshebel nach hinten, um den Sitz zu drehen. Der Sitz lässt sich in 45°-Schritten zu beiden Seiten drehen.

### Sitzhöhe hoch/runter

Den Sitz abnehmen. Die Kontermutter lösen und die Sitzstütze in die gewünschte Position bringen. Schraube und Kontermutter festziehen.

### Rückenlehne und Sitztiefe

Die Schrauben in der C-Schiene beidseitig lösen. Die Rückenlehne in die gewünschte Position ziehen/schieben. Die Schrauben wieder festziehen.

### Kopfstützenwinkel

Die Kopfstütze kann je nach Bedarf nach vorne/hinten geneigt werden.

### Höhenverstellung der Kopfstütze

Durch Drücken der Taste lässt sich die Kopfstütze nach oben und unten verstellen.



### Richtige Einstellung schafft die richtigen Voraussetzungen

Der Mini Crosser verfügt über einen fortschrittlichen Sitz. Eine gute Sitzposition ist wichtig, um das Elektromobil sicher und zuverlässig fahren zu können. Wir zeigen hier die gängigsten Einstellungen, um das Elektromobil an den Benutzer anzupassen.





**medemagruppen**